




iHealth[®] Wave

Motivación. Movimiento. Seguimiento.

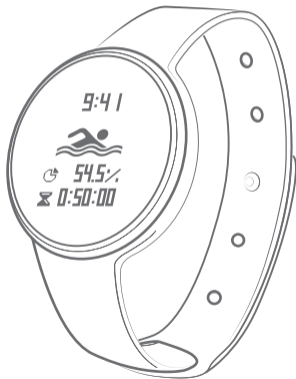

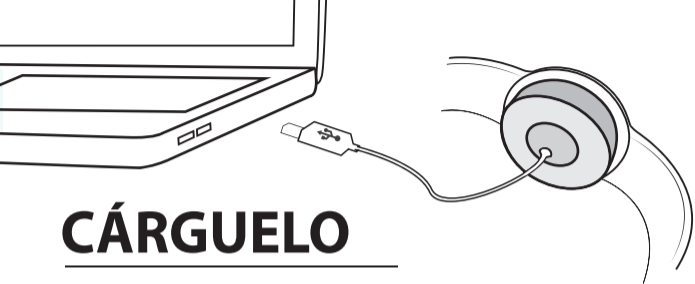

CÁRGUELO

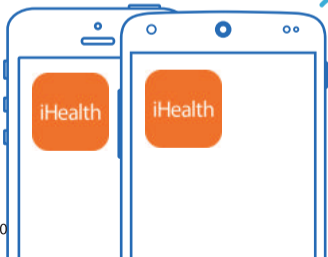

Dispone de un dispositivo móvil compatible?
Visite www.ihealthlabs.com/support para
comprobarlo!

OBTENGA LA APLICACIÓN

Busca y Descarga "iHealth Myvitals" de App
Store o Google Play

1 Muévase hacia arriba el Centro de Control y active el *Bluetooth*




iOS

Deslizar hacia abajo el Centro de Control y active el *Bluetooth*



ANDROID

2 Abra la aplicación y crear una nueva cuenta

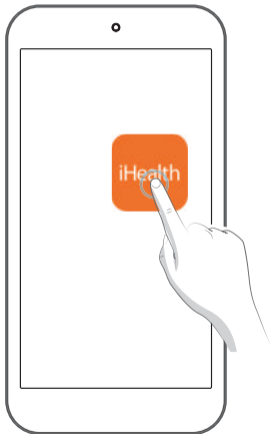


3 Seleccione "Trackers de actividad"



4 Seleccione "Wave (AM4)"





5 Seleccione "Siguiente"

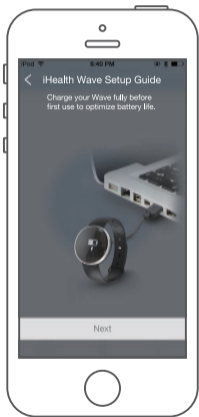


6 Enlace con el dispositivo



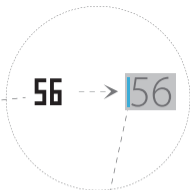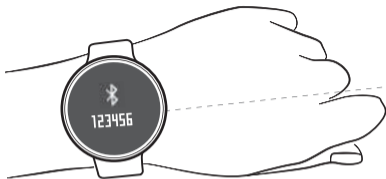

7 Introduzca los últimos 2 dígitos de la cifra de 6 dígitos que aparece en el monitor.


Si no ve la cifra de 6 dígitos, haga doble clic en el botón de Inicio (iOS) o vaya al menú de la aplicación (Android) y deslice el dedo sobre la aplicación para cerrarla totalmente. Repita de nuevo los pasos desde el paso 2.

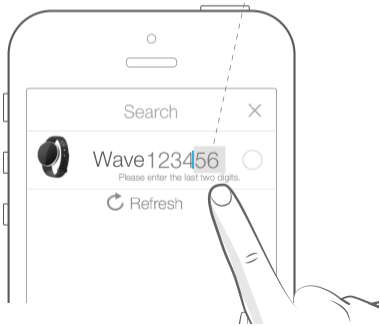

8

Emparejamiento correcto

Haga clic en "SINC" para sincronizar los datos con la aplicación y con la nube

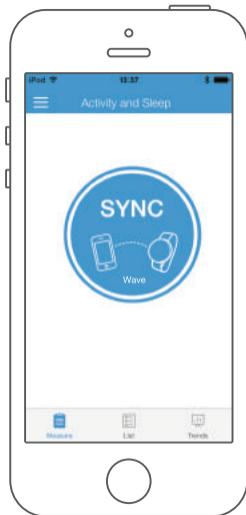

MODO ACTIVIDAD

En "configurar Mis dispositivos", se puede configurar una alerta que nos recuerde mantenernos activos a través del monitor "wave"

Objetivo/Progreso



Fecha/Hora



Número de pasos realizados



Levante la muñeca o suéltelo de la cintura y toque para navegar

Calorías quemadas



Distancia cubierta



RESUMEN DE ENTRENAMIENTO

Entrenamiento



Se generará un informe del resumen de entrenamiento especial cuando haya caminado o corrido de forma continuada durante más de 10 minutos

MODO SUEÑO

Modo sueño



Registre automáticamente la calidad de su sueño.
"En configurar mis dispositivos", se puede configurar una alarma por vibración a través del monitor "wave".

MODO NATACIÓN

Utilice Wave para el seguimiento de tu natación.
Reconoce automáticamente 3 estilos de natación:
Estilo libre, braza, espalda.



- Puede activar/desactivar el modo natación en "Configurar Mis dispositivos" cuando Wave está conectado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE REQUERIDA POR LA FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados específicamente por iHealth Lab Inc. anularán la autorización del usuario para usar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de los dispositivos digitales de Clase B, según el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación doméstica. Este producto genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto genera interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir las interferencias con una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o recolocque la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

El dispositivo cumple con la norma RSS exenta de licencia del Ministerio de industria de Canadá. Su funcionamiento tiene que cumplir los dos requisitos siguientes:

- (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias, y
- (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluidas interferencias que podrían producir un funcionamiento no deseado del dispositivo



PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE
POR UNA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO
LAS INSTRUCCIONES

Por la presente, [iHealth Lab Inc.] declara que este [AM4 WAVE] cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

La declaración de conformidad de la Directiva 1999/5/EC y todos los documentos de certificación y reglamentación de iHealth se pueden descargar del siguiente enlace:

<https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>

Temperatura de funcionamiento: 0~+40°C

Contacto y servicio de atención al cliente:

Fabricado por iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, EE. UU.

Tel: +1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com

Fabricado por iHealth Lab Europe.
3 rue Tronchet, 75008, Paris, France
www.ihealthlabs.eu support@ihealthlabs.eu



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

Tel: 86-22-60526161

Visite www.ihealthlabs.com para obtener
más información

iHealth[®] Wave